

EZee Life™

Chaise d'aisance pliante sur roulettes

Modèle : CH1025



Produits EZee Life^{MC}
34, Futurity Gate, Unité 15
Concord (Ontario) L4K 1S6



Spécifications

| | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| Limite de poids : | 220 lb | (100 kg) |
| Couleur : | PE blanc | |
| Hauteur d'assise : | 18 1/2 po | (47 cm) |
| Largeur d'assise : | 17 po | (43 cm) |
| Profondeur d'assise : | 15 3/4 po | (40 cm) |
| Hauteur du dossier : | 12 1/4 po | (31 cm) |
| Largeur totale : | 21 1/2 po | (55 cm) |
| Poids : | 11,5 lb | (5,2 kg) |

Renseignements importants

- 1) Lire les instructions avant l'assemblage; ne pas utiliser le produit sans obtenir les instructions adéquates d'un professionnel.
- 2) Communiquer immédiatement avec le distributeur pour tout élément endommagé ou manquant.
- 3) Bloquer les roulettes avant tout transfert.
- 4) Toujours vérifier l'ajustement sécuritaire du siège de toilette surélevé.
- 5) Vérifier les dommages ou l'usure excessive avant chaque utilisation.

Utilisation prévue

Appui au-dessus d'un siège de toilette ou chaise d'aisance près du lit.

Entretien quotidien

- 1) Toujours vider le seau d'aisance après usage.
- 2) Nettoyer le siège de toilette et le seau.
- 3) Nettoyer le revêtement et le cadre à l'aide d'un linge humide.
- 4) Utiliser des nettoyeurs pour toilette conformément aux instructions du fabricant.
- 5) Retirer les contaminants comme les fils ou les cheveux des pièces mobiles de la chaise d'aisance (roulettes).

L'entretien de toutes les pièces de la chaise d'aisance et l'usage adéquat prolongeront la durée de vie du produit et permettront des années de service sans défaillance. L'entreposage de la chaise d'aisance dans un endroit humide (bains de vapeur, salles de douche) ou à l'extérieur, combiné au manque d'hygiène, peut entraîner usure excessive, défaillances et dégradation des matériaux.

Assemblage de la chaise d'aisance

- ! Fixez les roulettes en insérant les tiges de roulettes dans le cadre de la chaise d'aisance; installez les roulettes munies de frein à l'arrière de la chaise d'aisance et les roulettes sans frein à l'avant.
- ! Installez le seau d'aisance sous le siège dans le cadre du seau.

Pièces de la chaise d'aisance

- 1) Appuie-bras
- 2) Cadre latéral
- 3) Barre de soutien du siège
- 4) Seau d'aisance
- 5) Roulette
- 6) Frein
- 7) Cadre du seau
- 8) Siège de la chaise d'aisance
- 9) Couvercle du siège



Instructions

- 1) La chaise d'aisance peut servir à transporter l'utilisateur sur de courtes distances, mais n'est pas conçue pour être utilisée comme fauteuil de transport. Utilisez-la pour de courts déplacements seulement.
- 2) En guise de siège d'aisance, glissez le seau d'aisance dans le support prévu à cet effet sous le siège.
- 3) En guise de soutien au-dessus d'une toilette, retirez le seau d'aisance et glissez la chaise au-dessus de la toilette.
- 4) Pour plier, retirez le seau d'aisance, ouvrez les supports latéraux vers l'extérieur et pliez la barre de soutien du seau vers le bas. Repliez les deux cadres latéraux vers le centre.



Avis de sécurité

- La chaise d'aisance est conçue pour une utilisation intérieure seulement. L'aide d'un soignant est requise.
- Ne jamais soulever la chaise d'aisance en la tenant par les appuie bras!
- La chaise d'aisance ne doit jamais servir à transporter l'utilisateur pour franchir des obstacles architecturaux (marches, entrées, rampes).
- Ne pas utiliser la chaise d'aisance sur des surfaces souples, inégales, non protégées comme la pelouse, le gravier ou le sable.
- L'usage de la chaise d'aisance sur une pente de plus de 2 % est dangereux et pourrait poser un risque de chute de la chaise.
- La chaise d'aisance ne doit jamais servir de siège dans un véhicule.
- Pour accroître la sécurité de l'utilisateur, il est possible d'ajouter une ceinture de sécurité.
- Ne pas se tenir debout sur le siège de la chaise d'aisance.
- Ne pas trop se pencher dans une direction ou l'autre lorsqu'assis sur la chaise d'aisance.

Mise en garde : Il est dangereux d'utiliser la chaise d'aisance après avoir remarqué tout dommage ou lorsque l'usure de certaines pièces peut causer un accident. Toutes les réparations nécessaires doivent être effectuées par une personne compétente.

Inspections

La chaise d'aisance doit être inspectée tous les trois mois ou plus souvent, au besoin. Pendant l'inspection :

- 1) Vérifiez la présence de dommages ou d'usure aux freins et vérifiez leur fonctionnement sécuritaire.
- 2) Vérifiez la présence de vis ou de quincaillerie lâches ou manquantes.
- 3) Vérifiez la présence de dommages ou d'usure aux roulettes et vérifiez qu'elles tournent librement (un bruit de grincement peut signifier que les roulements à billes sont usés et qu'ils nécessitent un réglage ou un remplacement).
- 4) Vérifiez la présence de fissures ou de dommages sur les joints du cadre.

Transferts

Avant tout transfert pour s'asseoir dans la chaise d'aisance ou s'en lever, les freins doivent être bloqués et l'assistance d'un soignant est requise.

L'utilisateur peut effectuer un transfert debout à partir d'un lit, d'une chaise ou d'un fauteuil roulant en se soutenant sur les appuie-bras.

L'utilisateur peut également retirer un appuie-bras et effectuer un transfert vers la chaise d'aisance en se glissant sur la chaise.

Pour les utilisateurs qui ne peuvent s'aider durant le transfert ou qui nécessitent une aide importante, différents types de lève-personnes peuvent être utilisés pour les transferts.

Garantie

Les produits de marque EZee Life^{MC} comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou d'autres dépenses éventuelles.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une usure normale, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une installation ou d'un assemblage inadéquats.

Le vendeur/fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions fournies.

Importé et distribué par :

Factory Direct Medical
34, Futurity Gate, Unité 15
Concord (Ontario) L4K 1S6
Téléphone : 416-739-8393
Sans frais : 855-235-2400

