

EZee Life™

Siège de toilette surélevé de Appuis-bras et couvercle amovibles

Modèle : CH2024 – 2 po

Modèle : CH2027 – 4 po



EZee Life™ Products
34 Futurity Gate, Unit 15
Concord, Ontario L4K 1S6



Garantie limitée:

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

Spécifications:

Hauteur d'assise :	CH2024 – 2 po	CH2027 – 4 po
Largeur d'assise :	16"	
Profondeur d'assise :	16"	
Limite de poids :	220 lb	
Poids :	Ch2024 - 7 lb	CH2027 – 8 lb

Caractéristiques:

- Appuis-bras amovibles rembourrés
- Construction de plastique moulé
- Surface profilée pour plus de confort
- Antitaches et anti-odeurs
- Se fixe de manière sécuritaire
- Modèle robuste et durable
- Installation sans outils

Instructions d'utilisation:

1. Retirez le produit de l'emballage et LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT avant d'entreprendre l'installation du produit.
2. Soulevez l'assemblage du couvercle et du siège et placez les ailettes arrière du siège de toilette autour du rebord de la cuvette. (Certaines cuvettes peuvent nécessiter de retirer l'assemblage en place pour permettre un ajustement adéquat.) En outre, l'avant de la pince d'ajustement doit dégager le rebord afin que le siège de toilette soulevé s'ajuste adéquatement.
3. En maintenant le siège de toilette soulevé et appuyé correctement sur le rebord, repositionnez et centrez le produit sur la cuvette au besoin. Tournez le bouton d'ajustement dans le sens des aiguilles pour resserrer le produit en place. Serrez à la main seulement – n'utilisez aucun outil, et assurez-vous de ne pas trop serrer pour éviter de ronger le filetage de la pince d'ajustement.
4. Vérifiez régulièrement la sécurité de l'ajustement avant d'utiliser le produit. Le poids de l'utilisateur doit être centré sur le siège, pas trop vers l'avant ni trop vers un des côtés pour éviter de faire basculer l'unité.
5. Si votre modèle de chaise d'aisance ne permet pas un ajustement adéquat du produit, ou qu'il ne permet pas de le serrer adéquatement comme indiqué ci-dessus, il est recommandé de ne pas poursuivre son utilisation.
6. Poids maximum de l'utilisateur : 220 lb.

Instructions pour le retrait

1. Tournez le bouton d'ajustement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le siège commence à se dégager.
2. Soulevez l'avant du siège de toilette surélevé et tirez vers l'avant pour l'enlever.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez toutes les pièces au savon et à l'eau chaude (jusqu'à 195 °F / 90 °C).
- Utilisez un détergent non abrasif ou un produit de nettoyage domestique avec de l'eau tiède.
- Rincez à l'eau tiède et asséchez.
- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANT OU DE LINGE ABRASIF avec ce produit pour ne pas l'endommager.





Mises en garde

- Ne vous appuyez pas sur le siège pour vous aider à vous asseoir ou à vous lever du siège.
- Assurez-vous que le siège est adéquatement verrouillé et installé de façon sécuritaire avant toute utilisation.
- Assurez-vous que le bouton d'ajustement à l'avant du siège est serré en tout temps et vérifier que le siège est bien fixé à la cuvette.
- Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart des chaises d'aisance. Il ne convient pas à tous les types de chaise d'aisance; assurez-vous que l'unité est adéquatement installée, ajustée et stable avant de l'utiliser.
- Modèles avec appuie-bras : Les appuie-bras servent à aider l'utilisateur à s'asseoir et à se lever. **N'UTILISEZ PAS** les appuie-bras pour soutenir le poids complet du corps pendant le transfert, pour éviter toute défaillance de l'unité.

Accoudoirs pivotants

Cette vie Ezee siège de toilette surélevé est équipé d' accoudoirs pivotants permettent au soignant ou à l'utilisateur de tourner accoudoirs pour le transfert facile et soins d'hygiène .

Pour faire pivoter les appuis-bras, soulever simplement le devant de l'appui-bras et diriger vers l'arrière.

Pour replacer les appuis-bras, les ramener vers l'avant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans les rainures moulées de la base.

Importé / Distribué par:

Factory Direct Medical
34 Futurity Gate, Unit # 15
Concord Ontario L4K 1S6
Local: 416-739-8393
Toll Free: 855-235-2400