

EZee Life™

32 po Pince longue

Modèle CH3052



Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat.

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMC se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles.

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Produits EZee Life^{MC}

34, Futurity Gate, Unité 15,
Concord (Ontario) L4K 1S6



Description :

La pince longue CH3052 de EZee LifeMC comprend une tête pivotante, une mâchoire moulée à extrémité aimantée et un mécanisme de détente. Cette pince est l'outil idéal pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à se plier ou des problèmes d'amplitude de mouvement à saisir des objets au sol ou sur des tablettes hautes de façon sécuritaire.

Spécifications :

Ouverture de la mâchoire :	4 po
Longueur :	32 po
Matériau du cadre :	Tube d'aluminium
Limite de poids :	18 lb
Poids du produit :	2 lb

Caractéristiques :

- Manche de 1/2 po en aluminium (poignée et mâchoires en plastique ABS)
- 32 po de longueur
- Se plie pour le rangement
- Tête pivotante
- Extrémité magnétique
- Mâchoire moulée et mécanisme à détente
- Mâchoire sensible à la pression
- Ouverture de la mâchoire de 4 po

Instructions d'utilisation :

Pour plier, tenez la poignée et la mâchoire et séparez-les. Repliez-les ensuite l'une sur l'autre.

Pour déplier, redressez le manche, alignez les extrémités et insérez la mâchoire dans la poignée.

Mâchoires pivotantes pour une meilleure flexibilité de ramassage