

EZee Life™

Appui-dos pour le lit

Modèle : CH3055



Aucun assemblage requis

EZee Life™ Products
34 Futurity Gate, Unit 15
Concord, Ontario L4K 1S6



Garantie limitée:

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

Description :

L'appui-dos pour le lit de Ezee LifeMC est une solution de rechange économique à un lit d'hôpital à la maison pour les patients qui n'ont pas besoin des caractéristiques propres à un lit d'hôpital. Cinq réglages possibles pour le dos.

Installation :

L'appui-dos pour le lit de Ezee Life est offert entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Réglez simplement l'appui-dos à l'angle désiré pour le dos et placez-le sur le lit.

Remarque – Ce produit fonctionne de manière optimale lorsqu'il est placé contre la tête de lit ou un mur pour éviter de glisser.

Spécifications :

Largeur du dossier :	24 po
Hauteur du dossier :	25 po
Profondeur du cadre :	18 po
Angles du dossier :	45°, 55°, 65°, 75° et 85°

Soin et nettoyage :

Afin de préserver le fini original, nettoyez à l'aide d'un savon doux et rincez à l'eau tiède. Essuyez l'appui-dos après l'utilisation au besoin.

Avertissements :

Vérifiez périodiquement l'assemblage pour en assurer la solidité. **POUR ÉVITER LES BLESSURES, N'UTILISEZ JAMAIS L'APPUI-DOS SI VOUS REMARQUEZ QUE L'ASSEMBLAGE PRÉSENT UN DESSERREMENT.**

Importé / Distribué par:

Factory Direct Medical
34 Futurity Gate, Unit # 15
Concord Ontario L4K 1S6
Local: 416-739-8393
Toll Free: 855-235-2400

