

EZee Life™

Fauteuil roulant pliant EZee Fold
électrique ultra-léger
CH4070


Guide de fonctionnement du
levier de commande




Produits EZee Life^{MC}

34, Futurity Gate, Unité 15, Concord (Ontario) L4K 1S6


Levier de commande

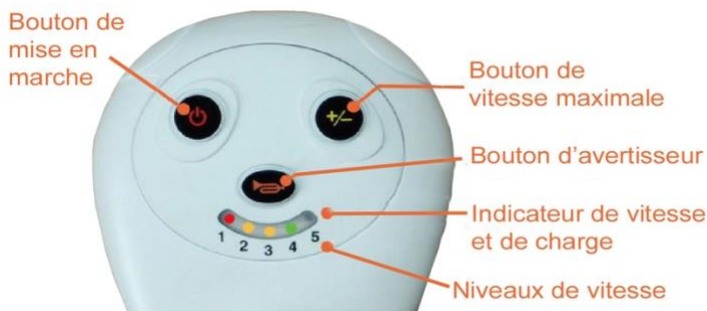


Nettoyez délicatement le levier de commande à l'aide d'un linge humide et d'un savon doux. Aucun nettoyant corrosif ou contenant de l'alcool.

 Fonction de mise en marche :


- 1) Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le fauteuil. Les témoins lumineux s'allument et l'avertisseur sonore retentit.
- 2) Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour éteindre le fauteuil. Les témoins lumineux s'éteignent et les fonctions du fauteuil sont désactivées.

 Bouton de l'avertisseur :


En appuyant sur le bouton, l'avertisseur sonore retentit jusqu'à ce qu'il soit relâché.

 Bouton de vitesse maximale :

Le bouton de vitesse maximale détermine la vitesse maximale du fauteuil roulant. La vitesse est contrôlée par le degré d'inclinaison du levier de commande (plus vous poussez le levier, plus la vitesse sera élevée). Même si la vitesse la plus élevée est sélectionnée, le fauteuil se déplacera lentement si le levier de commande est poussé légèrement.

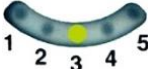 Indicateur de vitesse :

La barre d'indication de vitesse indique la vitesse à laquelle le fauteuil est réglé. Plus le chiffre indiqué par le témoin lumineux est élevé, plus la vitesse maximale du fauteuil sera élevée. L'image ci-dessus indique une vitesse maximale de 3.

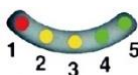

Indicateur d'état de la batterie :

Les témoins lumineux indiquant la vitesse servent également à indiquer le niveau de charge de la batterie. Les témoins allumés indiquent le niveau de charge.

Lorsque les 5 témoins sont allumés, la batterie est pleinement chargée. Les témoins s'éteignent progressivement à mesure que la charge diminue. Lorsqu'il ne reste qu'un témoin rouge, il est important de charger la batterie dès que possible.

En prévision d'un déplacement plus long, il est important de charger la batterie avant de partir, même si elle n'est pas complètement déchargée. Recharger occasionnellement une batterie ne nuira pas à son fonctionnement.

Recharge hors du fauteuil

Pour charger la batterie hors du fauteuil, branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale et le cordon de recharge dans le boîtier de la batterie.

Information sur la recharge :

- Alimentation du chargeur : 100 CA à 240 V, 50/60 Hz
- La batterie est chargée lorsque le témoin devient vert.
- N'utilisez pas le fauteuil pendant la recharge (le fauteuil ne fonctionne pas lorsque le chargeur y est branché).
- Pendant un entreposage de longue durée, chargez la batterie une fois par mois, même si le fauteuil n'est pas utilisé.



Ceinture de sécurité

Bouclez toujours la ceinture de sécurité lorsque vous conduisez le fauteuil.



Insérez l'extrémité mâle de la ceinture dans l'extrémité femelle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour détacher la ceinture, appuyez sur les côtés de la boucle et retirez l'extrémité femelle.

Autres renseignements

- Assurez-vous que le fauteuil est stable et que les pièces sont bien serrées avant utilisation.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée avant utilisation.
- Déplacez-vous à basse vitesse jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le fonctionnement du fauteuil.
- Assurez-vous que le fauteuil est éteint avant de vous asseoir ou de vous lever.
- Conduisez en douceur et n'exercez pas de pression excessive sur le levier de commande.

Modes électrique et manuel

Les fauteuils électriques n'avancent pas en mode conduite à moins que le levier de commande ne soit actionné. Pour pousser le fauteuil manuellement, il doit être mis en mode roues libres.



Pour passer au mode roues libres, tirez sur le moyeu de chaque roue arrière et tournez-le de 90 degrés. Pour revenir au mode électrique, tournez le moyeu dans le sens inverse et repoussez-le à l'intérieur de la roue.



La photo du bas illustre une roue en mode roues libres.

Dépliage



Pour déplier le fauteuil, tenez les points A et B du cadre comme l'indique la photo et tirez sur le point B.

Assurez-vous que le cadre est ouvert en entier et verrouillé. Testez la sécurité du cadre pour vous assurer qu'il est bien verrouillé et qu'il ne se repliera pas involontairement.



En tenant l'extrémité des appuis-bras, faites-les pivoter vers le haut et vers l'avant jusqu'à ce qu'ils s'appuient sur le butoir du cadre arrière.



Abaissez le repose-pieds en position horizontale.



Conduite

Assurez-vous que le moteur est éteint, assoyez-vous sur le siège et appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le fauteuil roulant. Poussez le levier de commande dans la direction dans laquelle vous souhaitez vous déplacer.



Plus vous poussez le levier, plus le fauteuil se déplace rapidement. Les freins s'engageront automatiquement lorsque le levier est relâché.



Le levier de commande peut être assemblé sur l'appui-bras droit ou gauche.

HPU Medical Wholesale
34 Futurity Gate, Unit # 15
Concord (Ontario) L4K 1S6
Téléphone : 416-739-1267
Sans frais : 888-634-5808
Télec. : 416-739-7171