

# EZee Life™

---

## Fauteuils roulants en aluminium



CH1096 – Largeur d'assise de 18 po

CH1097 – Largeur d'assise de 20 po

EZee Life™

15-34 Futurity Gate, Concord Ontario L4K 1S6

## Spécifications:

Largeur d'assise:	18 po (CH1096) 20 po (CH1097)
Profondeur d'assise :	16 po
Hauteur d'assise	20 po
Type de cadre :	Aluminium – Traverse double
Type d'appui-bras	Longueur bureau, pivotants
Type de repose-pieds:	Pivotant à 60°, détachable (17 po - 21po)
Palettes de repose-pieds :	Aluminium, rabattables
Pneus arrière :	24 po x 1 po, anti-crevaison
Roulettes :	8 po x 2 po, anti-crevaison
Dispositif de blocage des roues :	Pousser pour verrouiller complètement
Roulettes antibascule :	Oui (4 po plage de réglage)
Limite de poids :	300 lb
Poids:	36 lb (CH1096) 37 lb (CH1097)



### Composantes du fauteuil roulant

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| A. Poignées de poussée    | F. Roulette                |
| B. Revêtement du dossier  | H. Appui-bras              |
| C. Roue arrière           | I. Levier de l'appui-bras  |
| D. Mains-courantes        | J. Leviers de frein        |
| E. Dispositif antibascule | K. Repose-pieds            |
|                           | L. Palette du repose-pieds |

## Reter les appuis-bras

Appuyez sur la goupille-poussoir de l'appui-bras (1) et tirez le haut avec les deux mains (2).

**N'OUBLIEZ PAS** : Le retrait des appuis-bras facilite le transfert du fauteuil au lit ou à la voiture et vice versa.

**MISE EN GARDE** : En remplaçant les appuis-bras, assurez-vous qu'ils sont bien en place avant le transport.

(2) Tirer vers le haut pour retirer



(3) Rabattre vers l'arrière

(1) Goupille-poussoir de relâchement

## Rabattre les appuis-bras

Pour rabattre l'appui-bras vers l'arrière, appuyez sur la goupille-poussoir et soulevez l'avant de l'appui-bras (3) vers le haut.

## Plier et déplier

- Pour plier, relevez les palettes des repose-pieds ou retirez-le complètement. Tirez sur l'avant et l'arrière du revêtement du siège, au centre.
- Pour déplier, appuyez sur le cadre latéral du siège jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Installez les repose-pieds ou dépliez les palettes des repose-pieds.

## Régler la longueur du repose-pieds



Placez la clé fournie sur le boulon et faites tourner vers la gauche pour desserrer et vers la droite pour serrer en place. Réglez la longueur en faisant glisser le repose-pieds vers le haut ou vers le bas de sorte que les cuisses de l'utilisateur soient complètement soutenues par le siège.

**N'OUBLIEZ PAS** : Gardez un dégagement d'au moins 2 po (5 cm) entre le sol et les palettes des repose-pieds pour franchir les seuils de porte.

**N'OUBLIEZ PAS** : Si les genoux de l'utilisateur sont trop élevés, il pourrait éprouver des douleurs au fessier causées par une pression accrue. Si ses genoux sont trop bas, l'utilisateur pourrait glisser du fauteuil.

## Retirer et replacer les repose-pieds

Faites pivoter le repose-pieds vers le côté en appuyant sur le levier. (1) Saisissez la tige supérieure du repose-pieds et soulevez-le (2) en le dégageant des goupilles. Répétez de l'autre côté.

En tenant le repose-pieds dans une main, alignez les goupilles avec les trous sur le côté du repose-pieds et fixez-le (3). Faites pivoter le repose-pieds dans sa position.



## Actionner et les freins

Poussez sur le levier de frein vers l'avant pour verrouiller et tirez vers l'arrière pour relâcher.

**N'OUBLIEZ PAS** : Actionnez les freins avant de vous asseoir dans le fauteuil ou de vous en lever.

## Roues et roulettes

Les roues et les roulettes sont munies de bandages pleins sans entretien qui ne se dégonfleront pas s'ils sont coupés ou crevés par des débris sur le sol.

Le fauteuil est muni de roulettes de 8 po de diamètre et de roues de 24 po de diamètre facilitant le déplacement sur des surfaces accidentées et de petits obstacles.

Ainsi, l'aidant pourra tirer le fauteuil en sens inverse sur des surfaces très accidentées ou souples jusqu'à une surface plus lisse ou rigide.

## Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.
3. **N'OUBLIEZ PAS** : Actionnez les freins avant de vous asseoir dans le fauteuil ou de vous en lever.
4. **NE** surchargez **PAS** ce fauteuil roulant. La limite de poids est de 300 livres, ce qui inclut l'utilisateur et tout ce qu'il transporte.





## Points d'inspection

- Assurez-vous que le fauteuil de transport roule en ligne droite (pas de résistance ni de traction d'un côté).
- Inspectez le revêtement à la recherche de déchirures ou d'affaissement.
- Inspectez les poignées à la recherche d'usure, de relâchement ou de dommages.
- Vérifiez la quincaillerie ou les pièces lâches ou brisées.
- Vérifiez la présence de rayons fissurés, brisés ou lâches.
- Assurez-vous que les freins à main N'interfèrent PAS avec le roulement des pneus pendant le déplacement.
- Assurez-vous que les freins s'engagent facilement.

## Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie.

Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles.

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

## Renseignements sur l'achat :

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Adresse du distributeur : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

### Importé / Distribué par:

Factory Direct Medical  
34 Futurity Gate, Unit # 15  
Concord Ontario  
Canada, L4K 1S6  
416-739-8393  
855-235-2400

