

**EZee Life<sup>®</sup>**

Fauteuil de transport de luxe  
Modèle CH1045



HPU Medical Wholesale  
34, Futurity Gate, Unité 15, Concord (Ontario) L4K 1S6



## Table des matières

Spécifications	2
Caractéristiques	2
Déballer et déplier le fauteuil	3
Plier le fauteuil	4
Fonctionnement des freins	4
Ceinture de sécurité	4
Vérifications avant utilisation	5
Avertissements	5
Garantie	6

## Spécifications

Cadre – Aluminium léger

Poids – 9,5 kg (21 lb)

Roues arrière – 30,5 cm (12 po)

Roulettes avant – 13 cm (5 po)

Largeur du siège – 45,7 cm (18 po)

Profondeur du siège – 38 cm (15 po)

Hauteur du dossier – 40,6 cm (16 po)

Hauteur des appuis-bras – 22,9 cm (9 po) (à partir du siège)

Dimensions plié – 50,8 × 63,5 × 45,7 cm (20 × 25 × 18 po)

Limite de poids – 100 kg (220 lb)

Rayon de virage – 85 cm (33,5 po)

## Caractéristiques

Poignées de manœuvre de type poussette

Coussin en mousse à mémoire de forme

Frein à main double

Appuis-bras pivotants

Panier de transport sous le siège

Repose-pieds monopièce

Ceinture de sécurité

# Fonctionnement

## Déballer et déplier le fauteuil

1. Ouvrez l'emballage et sortez le fauteuil en le soulevant.
2. En tenant le siège, tirez le cadre croisé arrière et dépliez. Fig. 1
3. Tirez sur le dossier vers l'arrière pour étendre le revêtement. Fig. 2
4. Abaissez les appuis-bras.
5. Soulevez les goupilles de verrouillage. Fig. 3
6. Faites tourner le levier de la goupille pour le replier vers l'arrière du fauteuil. Fig. 4
7. Abaissez le levier de la goupille pour verrouiller le cadre. Fig. 5
8. Désactivez le frein. Fig. 6 (Assurez-vous de toujours activer le frein lorsque vous transférez une personne sur le fauteuil ou hors du fauteuil.)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Information



## Plier le fauteuil

1. Activez les freins.
2. Relevez les deux appuis-bras.
3. Relâchez le levier de verrouillage. Fig. 7
4. Prenez le siège d'une main et une poignée de l'autre.
5. Pliez le dossier vers l'avant. Fig. 8
6. Pliez le fauteuil en entier. Fig. 9



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

## Fonctionnement des freins

Les freins du fauteuil de transport CH1045 peuvent être activés au pied ou aux poignées par l'aidant.

Les freins à main sont semblables à ceux d'un déambulateur ou d'un vélo et sont actionnés en serrant le levier de freinage.



Le frein au pied est une barre en forme de boucle située entre les roues qui active les deux freins simultanément. L'aidant n'a qu'à pousser la barre vers le bas avec le pied pour activer le frein ou soulever la barre pour le désactiver.



**Remarque :** Les freins ne seront pas sécuritaires si les roues sont usées ou endommagées.

## Ceinture de sécurité

Le fauteuil de transport CH1045 est muni d'une ceinture de sécurité pour la sécurité du passager. Il est important de l'utiliser chaque fois que l'utilisateur se déplace dans le fauteuil pour éviter les blessures en cas de chute du siège. Les ceintures à déclenchement latéral sont déclenchées en pressant les deux côtés de la boucle.

## Vérifications avant utilisation

- Assurez-vous du bon fonctionnement des freins.
- Assurez-vous que les boulons et les écrous sont bien serrés et que le cadre est stable.
- Assurez-vous que le coussin n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les pneus ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que le cadre n'est pas plié ou brisé.
- Vérifiez que les roulettes avant et les fourches sont en bon état.
- N'utilisez pas le fauteuil si un élément semble non sécuritaire ou endommagé.

## Avertissements

- Assurez-vous que les poignées de manœuvre sont bien serrées avant d'utiliser le fauteuil de transport. Si elles sont lâches ou usées, remplacez-les.
- Pour éviter de basculer, NE tentez PAS d'atteindre des objets en vous avançant sur le siège.
- Pour éviter de basculer, NE tentez PAS d'atteindre des objets au sol en vous penchant entre vos genoux.
- Pour éviter de basculer, NE vous inclinez PAS par-dessus le dossier pour atteindre des objets derrière vous; cela pourrait faire basculer le fauteuil de transport.
- Pour éviter de basculer, NE transférez PAS votre poids ou votre position sur le siège dans la direction que vers laquelle vous étendez votre bras.
- N'utilisez PAS un escalier mécanique pour déplacer un fauteuil de transport d'un étage à un autre. Il pourrait en résulter des blessures graves.
- NE vous assoyez PAS ou n'effectuez pas un transfert dans un fauteuil de transport qui n'est pas complètement ouvert.
- N'empruntez PAS de rampes et ne vous engagez pas transversalement dans des pentes de plus de 8 degrés d'inclinaison.
- Dans les pentes, déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. NE vous engagez PAS transversalement dans les pentes.
- Soyez prudent sur les surfaces glissantes.
- NE serrez PAS trop la quincaillerie fixée au cadre.
- Cela pourrait endommager les tiges du cadre ou le filetage.
- NE vous tenez PAS debout sur les palettes de repose-pieds.
- NE vous tenez PAS debout sur le siège.
- NE surchargez PAS ce fauteuil de transport. La limite de poids de 100 kg (220 lb) inclut l'utilisateur et tout ce qu'il transporte.





## **Garantie limitée**

Les produits de marque EZee Life<sup>MD</sup> s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication.

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee Life<sup>MD</sup> se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles.

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

### **Importé / Distribué par :**

HPU Medical Wholesale  
34 Futurity Gate, Unit # 15  
Concord (Ontario) L4K 1S6  
Téléphone : 416-739-1267  
Sans frais : 1-888-634-5808