

EZee Life™

Barre d'appui chromée striée

N° de modèle Grandeur

CHRF2010	12''
CHRF2011	16''
CHRF2012	18''
CHRF2013	24''
CHRF2014	32''



La bride flottante permet l'installation à la verticale, à l'horizontale ou en angle.

Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat.

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMC se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles.

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Produits EZee LifeMC

34, Futurity Gate, Unité 15,
Concord (Ontario) L4K 1S6



Spécifications :

Espace entre le mur et la barre : 1 ½ po entre le mur et la zone de prise

diamètre de la barre : 1 po

Longueur de la barre : 12 po, 16 po, 18 po, 24 po ou 32 po

Méthode d'installation : Visser au mur à l'aide de la bride rotative

Limite de poids : Dépend du mur et de la qualité de l'installation

Caractéristiques :

Acier chromé durable

Facile à nettoyer

Prise striée antidérapante

Installation à la verticale, à l'horizontale ou en angle

1 ½ po entre le mur et la zone de prise

Offerte en cinq longueurs

Installation :

REMARQUE : Les brides de fixation de la barre d'appui doivent être alignées aux poteaux muraux. Pour assurer un appui solide, les vis à bois doivent traverser le panneau du mur ou la tuile pour se fixer dans les poteaux muraux. Dans le cas de baignoire en plastique ou de douche encastrée, percez un trou et installez la barre d'appui dans les poteaux muraux.

1. Placez la barre d'appui sur le mur, vis-à-vis les poteaux muraux et marquez l'emplacement des trous de vis. (Installation horizontale, voir Figure 1; Installation verticale, voir Figure 2.) Après avoir choisi le type d'installation, percez un petit trou pour confirmer l'emplacement du poteau.

AVERTISSEMENT : Les deux vis à bois dans chaque bride doivent être fixées aux poteaux muraux sans quoi la barre d'appui peut se décrocher et causer de sérieuses blessures.

2. Utilisez une mèche à maçonnerie pour percer la tuile ou le coulis. (Faites attention en perçant des trous près des rebords des tuiles. Elles pourraient s'ébrécher ou se briser.) Pour les vis à bois, percez de petits trous de guidage dans les poteaux muraux.

3. Une fois les trous percés, placez la barre d'appui au mur et fixez à l'aide des vis à bois.

REMARQUE : Calfeutrez autour des brides de la barre d'appui pour éviter l'infiltration de l'humidité dans les murs.

4. Serrez toutes les vis et les boulons à l'aide d'un tourne-vis. Vérifiez la solidité périodiquement. Ne vous appuyez jamais sur la barre d'appui si elle n'est pas serrée pour éviter tout risque de blessure.

Figure 1

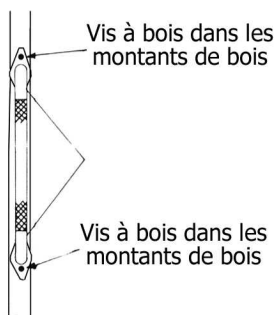


Figure 2

